

<b>AZ - APOTHEEK</b>	<b>werkprocedure</b>	<b>STE-00002:02</b>
auteur : XXX .....	handtekening : .....	Datum uitgifte : 06/06/02
handtekening verantwoordelijke : <b>Apr. X</b> .....		Datum herziening : 27/09/05 blz. 1 van 1
titel : <b>Samenstellen en verpakken instrumentensets</b>		

### Vorbereiding

1. Leg een papieren veld open op de inpaktafel.
2. Neem een instrumentenmand met de gepaste afmeting en leg er een absorberend inlegvel in.
3. Neem een inventarisblad van het desbetreffend set.
4. Neem zo nodig ook het inventarisboek met verklarende foto's.

### Sorteren en samenstellen

1. Controleer alle instrumenten op een goede reinigen, eventuele beschadiging en een goede werking.
2. Leg alle instrumenten per soort.
3. Leg de scharnierende instrumenten met geopende scharnier dakpansgewijs op elkaar.
4. Controleer het aantal aan de hand van de inventaris.
5. Olie de scharnieren met behulp van de ter beschikking staande spuitbus met instrumentenolie.
6. Plaats de instrumenten in de instrumentenmand van links naar rechts zoals aangegeven op de foto.
7. Instrumenten met sluitsysteem mogen hoogstens in het eerste tandje gesloten zijn.
8. Plaats het inventarisblad bovenop de instrumenten met de gedrukt kant naar boven.

### Inpakken

1. Vouw de groene doek op en leg hem opzij.
2. Neem een one-step inpakvel met de gepaste afmeting .
3. Leg daarop een onderlegvel met de gepaste afmeting.
4. Plaats de instrumentenmand daarop en verpak het set.
5. Grote manden (48X24) worden verpakt in de lengte, **uitgezonderd voor grote containers : deze worden overhoeks ingepakt..**
6. Kleine manden (24X24) worden overhoeks verpakt.
7. Kleef de verpakking toe met sterilisatietape.
8. Vul de hanglabel in (ontbrekende instrumenten, uur, naam inpakker) en kleef deze op de korte zijde rechts.
9. Plaats de mand in een sterilisatiemand.