

<b>AZ - APOTHEEK</b>	<b>werkprocedure</b>	STE-00013
auteur : XXX	handtekening : .....	21-04-2007
handtekening verantwoordelijke : Apr. X	.....	blz. 1 van 1
titel : <b>Gebruik gassterilisator Sterivac 5XL</b>		

### BEGIN STERILISATIE

1. Laat de stroom altijd aan staan (knop linkerzijde van het toestel).
2. Plaats het gaspatroon in de kamer.
3. Plaats de lading met de biologische indicatoren in het toestel.
4. Sluit de deur door het handvat *in wijzerzin* tot het einde te draaien.
5. Kies de temperatuur.  
Normale temperatuur is WARM.  
KOUD wordt alleen gebruikt bij sterilisatie van pacemakers.
6. Duw op START.

### EINDE STERILISATIE / ONTLUCHTING

Op het einde van de sterilisatiecyclus gaat het toestel spontaan in ontluuchtingsfase.

1. Open de deur door het handvat *in tegenwijzerzin* tot het einde te draaien.
2. Even wachten tot de druk van "920" naar "999" gestegen is en de deur vanzelf open springt.
3. Biologische indicatoren uitnemen en toestel sluiten.
4. Ontluchting gaat spontaan verder.

### EINDE ONTLUCHTING

1. Open de deur door het handvat *in tegenwijzerzin* tot het einde te draaien.
2. Even wachten tot de druk van "920" naar "999" gestegen is en de deur vanzelf open springt.
3. Verwijder de lading en duw op de stop-knop terwijl de deur open staat.
4. Sluit de deur.